

FFP2

Mascarilla de filtración

Infantil. De 6 a 12 años



Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 - NR (No reutilizable)

Modelo: STC-F2-01

Tamaño: 128 x 97 mm

Edad recomendada: 6 - 12 años

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

Especificaciones

Diseño que se ajusta a la cara perfectamente

Alta respirabilidad

Doble welding que garantiza la resistencia de los cordones hasta 25 newtons


Con **regulador de tamaño**

Embalado en bolsa individual:

- Con cierre zip para guardar la mascarilla mientras no se usa
- Con identificador de horas de uso
- Con identificador del propietario
- Sistema de ventilación antibacterias

Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Sujete la mascarilla con una mano, posicionándola en la cara de forma que cubra la nariz y la barbilla.
2. Coloque la cinta superior por detrás de la cabeza.
3. A continuación, pase la cinta inferior por detrás de la cabeza hasta colocarla a la altura de la nuca. Ajuste el regulador para una sujeción óptima.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.

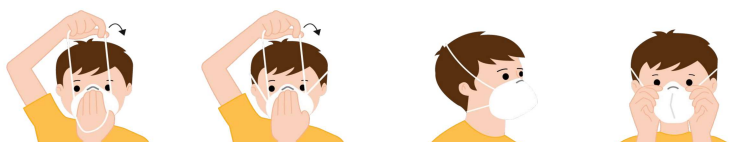

CE 0370
EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2
Infantil. 6 - 12 años



FFP2

Mascarilla de filtración

Infantil. De 6 a 12 años



Información importante

- Los equipos NR no deben usarse más de 8 horas.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa
Dimensión: 130 x 205 mm
Peso: 12 g

SKU: MASK-ST-00031.0001



Características paquete 10 uds

Cantidad: 10 uds(bolsas individuales)/caja
Dimensión: 132 x 210 x 45 mm
Peso: 130 g

SKU: MASK-ST-00031.0010



Características de la caja

Cantidad: 60 paquetes/caja
Total cantidad: 600 unidades
Dimensión: 485 x 415 x 444 mm
Peso: 9,5 Kg

CE 0370

EN 149:2001 + A1:2009